



aplikátor na znecitlivenie miesta vpichu chladom

Upozornenia

Nerobte aplikátor (neodstraňujte kovový kryt a nevyliievajte chladiacu náplň). Chladiaca náplň je horľavá a preto musí byť aplikátor uchovávaný mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla.

Tento výrobok je určený výhradne na znecitlivenie pokožky pred vpichom injekcie. Výrobok je vhodný pre dospelých aj deti akéhokoľvek veku.

Výrobok nepoužívajte, ak je porušený, keď bolo manipulované s niektorými z jeho častí alebo ak niektorá časť chýba.

Zásobník na dezinfekčný roztok musí byť vždy naplnený dezinfekčným roztokom, alebo alkoholom (minimálne 70% koncentrácia).

Návod na použitie

Coolsense aplikátor (spolu s naplneným integrovaným zásobníkom na dezinfekčný roztok) vložte do mrazničky/výparníku chladničky (kovovou časťou aplikátora smerom nahor), aspoň jednu hodinu pred použitím.

Po vybratí aplikátora z mrazničky sa presvedčte, či je teplota na zabudovanom teplomere v rozmedzí od 0 °C do - 4°C. Ak je teplota pod - 4°C, počkajte, až sa zahreje na - 4°C. Ak je teplota vyššia ako 0°C, aplikátor dajte späť do mrazničky.

Odskrutkujte vrchnák s integrovaným zásobníkom na dezinfekčný roztok a položte ho na gumový vrchnáčik. Presvedčte sa, či je kovová plôška aplikátora pokrytá dezinfekčným roztokom.

Aplikátor priložte kovovou plôškou na miesto plánovaného vpichu na 4-5 sekúnd a potom ihneď aplikujte injekciu/vpich. Pred vpichom neodstraňujte dezinfekčný roztok z pokožky.

Skontrolujte, či je v zásobníku dezinfekčný roztok a aplikátor vložte späť do mrazničky/výparníku.

Demonštračné video nájdete na: www.coolsense.net

Výrobca:

Coolsense Ltd.
148 Even Gvirol
62966 Tel-Aviv, Izrael
www.coolsense.net

Dovozca a distribútor pre SR:

Eurolab Lambda a.s.
T. Milkina 2
917 01 Trnava
tel.: 033-5341 448-9
eurolambda@eurolambda.sk
www.coolsense.sk